

miB
Make It Best

نحوه اتچمنت گذاری
با استفاده از تمپلیت

Attachment Bonding
Instruction



پروتکل اتچمنت گذاری با استفاده از تمپلیت :

در برخی از طرح درمان های سیستم الاینترپی، اتچمنت هایی بر روی دندان ها طراحی و تعبیه می شوند تا الاینرها نیروی بهینه و موثرتری را برای انجام حرکات پیچیده ای مانند روتیشن و اکستروژن فراهم کنند.

ابتدا مراحل کار و علت اتچمنت گذاری را برای بیمار توضیح داده و اتچمنت گذاری را با استفاده از پلاک تمپلیت که توسط شرکت ایده برتر کیوان ارسال می شود، طبق پروتوکل زیر انجام دهید.



دستگاه لایت کیور



اسید اچ



پلاک تمپلیت



باندینگ




کامپوزیت فلو




۳

پلاک تمپلیت را در دهان بیمار امتحان کنید.

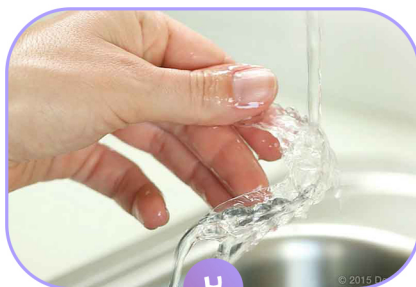

۲

پلاک تمپلیت را با آب سرد بشویید.

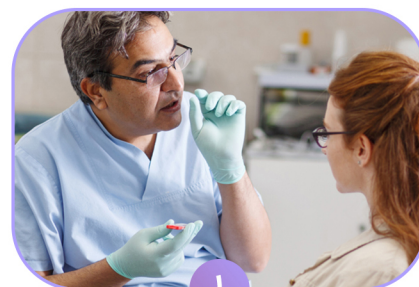


۱

علت اتچمنت گذاری را برای بیمار خود توضیح دهید.



۶

دندان را برای ۱۵ ثانیه شست و شو داده و خشک نمایید.

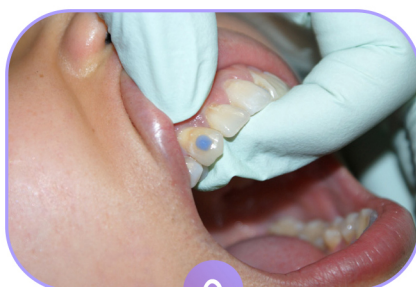

۵

سطح دندان‌هایی که نیاز به نصب اتچمنت دارند را اچ نمایید.



۴

محل دقیق اتچمنت‌ها را شناسایی و بررسی کنید.



۹

فرورفتگی روی پلاک را با مقدار مناسبی کامپوزیت پر نموده و سطح آن را با قلم صاف نمایید.



۸

باندینگ را ۱۰ ثانیه light cure کنید. (دستگاه را کاملا روی دندان قرار دهید).




۷

باندینگ را روی سطح اچ شده قرار داده و بعد ۲۰ ثانیه با فشار ملایم پوار هوا لایه را نازک کنید.



۱۲

پلاک را از دهان خارج نموده و مابقی کامپوزیت و باندینگ را جهت حفظ فرم اتچمنت از روی دندان بردارید.

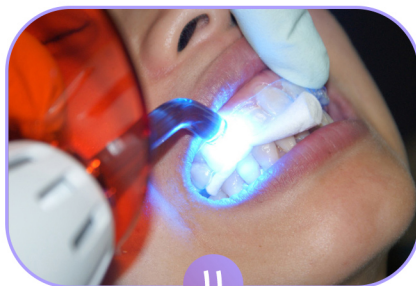

۱۱

کامپوزیت را لایت کیور کنید



۱۰

پلاک تمپلیت را کاملا روی دندان‌ها قرار دهید و با کمک دست آن را در تمامی نواحی دندان‌ها محکم کنید.